

Interton GN

Interton Move

Die neue vollständige Hörsystem-Familie



GN Making Life Sound Better

Genieße jeden Moment des Tages mit Interton Move

Wenn Sie mehr für sich und Ihre Kunden erreichen möchten, zaubert Interton Move Ihnen ein Lächeln ins Gesicht.

Wir bei Interton verstehen, dass das Leben mit einem Hörverlust eine Herausforderung sein kann – doch wir sind überzeugt mit unkomplizierten, findigen und effektiven Hörlösungen von hoher Qualität dazu beizutragen, dass das Leben Ihrer Kunden einfach und voller Lebensfreude ist. Und dies zu einem fairen Preis, denn gutes Hören darf erschwinglich sein. Interton Move ist die größte und umfassendste Erweiterung unseres Portfolios und bietet Ihren Kunden einen einfachen Zugang zu großartigen Hörerlebnissen.

Interton Move basiert auf bewährter GN-Technologie und unserer neuen Chip-Plattform. Es kombiniert die sehr gute Klangqualität mit nahtloser Konnektivität zu iOS- und kompatiblen Android™-Geräten (gestützt durch unsere intuitive Interton Sound App) und bietet eine leistungsstarke, wiederaufladbare Option mit

blitzschnellen Ladezeiten. Und das ist noch nicht alles. Wir wissen, dass Sie Ihre Zeit besser nutzen können, als sich mit neuer Anpass-Software zu beschäftigen. Deshalb funktioniert Interton Move mit derselben vertrauten Software – stabil und intuitiv in der Benutzung.

Interton Move ist mehr als nur ein großartiges Produkt – es ist eine komplette Produktfamilie mit drei Technikstufen und zahlreichen Bauformen. Interton Move hilft Ihnen, Neukunden zu gewinnen und Bestandskunden für neue Hörsysteme zu begeistern. Leichte bis hochgradige Hörverluste können versorgt werden, denn Interton Move ist in allen Bauformen erhältlich – sogar als Super Power HdO.

Interton Move ist ein großartiger Schritt nach vorne für Ihr Unternehmen und für Ihre Kunden.



WHO 4 WHO4-Nummer für RIC mit UP-Hörer / 80er & 90er
➔ Bauform 61, 61 Akku, 62 mit Tinnitus-Nummer für MP

Interton Move Highlights

- Bauformen für milden bis an Taubheit grenzenden Hörverlust
- Akku-Hörsystem mit bis zu 30 Stunden Laufzeit
- Neuer Chip für großartiges Klangerleben
- Direktes Audio-Streaming von iOS und Android™





Vorteile des neuen Chips

- 100 % schnellere Verarbeitung und Speicherkapazität
- 20 % weniger Stromverbrauch
- Eingangsdynamik bis 116 dB SPL
- Durch die Impulsschallunterdrückung werden plötzlich auftretende laute Geräusche reduziert, ohne das Sprachverstehen zu beeinflussen

Der erste Schritt zu einem großartigen Hörsystem ist ein starkes Fundament

Ihre Kunden sind aktive Menschen, die ihr Leben genießen und nicht durch ihren Hörverlust eingeschränkt sein möchten. Aus diesem Grund basiert Interton Move auf einer leistungsstarken neuen Chip-Plattform, die eine ausgezeichnete Klangqualität bietet, damit Ihre Kunden sich auf ihr Hören verlassen und sich vollkommen in den schönen Momenten verlieren können, die ihnen wichtig sind.


Die neue Chip-Plattform verdoppelt den Speicher und die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu unseren früheren Hörsystemen. Dies verbessert alle Aspekte des Hörsystems. Ein sauberer, verzerrungsfreier Klang trägt entscheidend zu einem angenehmen Hörerlebnis bei. Ein großer Vorteil des neuen Chips ist die verbesserte Signalklarheit, da das Signal, welches

von den Mikrofonen aufgenommen wird, digital detailreicher wiedergegeben werden kann. Sehr laute Geräusche - bis zu 116 dB SPL - können jetzt digital von Interton Move reproduziert und verarbeitet werden, anstatt abgeschnitten oder verzerrt zu wirken.

Dies gilt insbesondere für Musik, ein Signal mit besonders breitem Dynamikbereich von leisen bis lauten Klängen. Musikliebhaber werden wieder mehr Freude an ihrer Musik haben.

Außerdem steigt die Energieeffizienz um 20 Prozent, was in einer längeren Batterielaufzeit resultiert. Interton Move arbeitet schneller und effizienter als frühere Produkte und das mit mehr Leistung für alle zusätzlichen Funktionen, die wir hinzugefügt haben.


Klang von
Interton Move

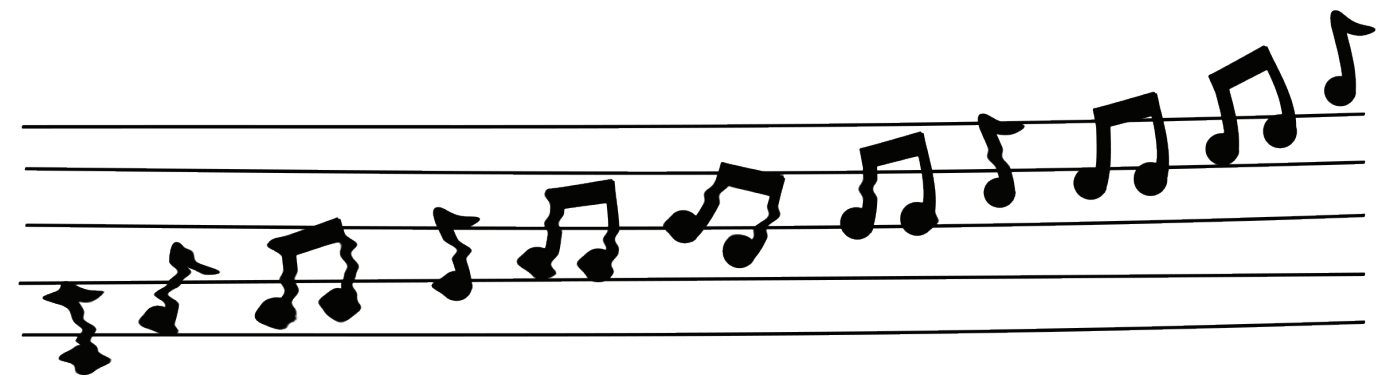

Klang eines durchschnittlichen Hörsystems

Interton Move

Audiologische Übersicht

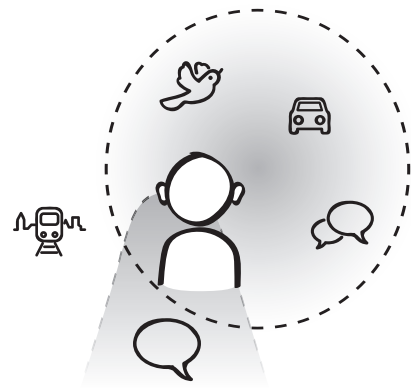


Kombinierte Direktionalität

Eine binaurale Strategie, die eine omnidirektionale Mikrofoncharakteristik an einem Ohr mit einer direkten Charakteristik am gegenüberliegenden Ohr kombiniert.

Vorteil

Gibt den Hörsystemträgern die Möglichkeit, die Situation zu beobachten und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf das Geräusch zu richten, das sie am meisten interessiert.

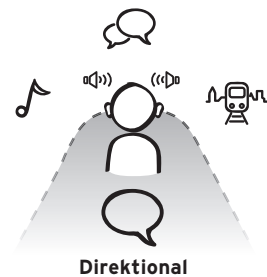

Direktional



Omnidirektional

Direktionalitätsautomatik

Das Hörsystem analysiert die Klangumgebung und wechselt die Mikrofoneinstellungen zwischen omnidirektional und direktional. Im direkten Modus kann sich der Öffnungswinkel so anpassen, dass Sprachverstehen in lauter Umgebung maximiert wird. Das Umschalten erfolgt so sanft, dass der Benutzer die Veränderung nicht bemerkt.

Vorteil

Die Hörsystemträger können durch automatisches Umschalten von einem besseren Sprachverstehen profitieren, wenn dies benötigt wird, ohne die Programme manuell wechseln zu müssen. Die Übergänge zwischen den Mikrofonmodi werden sanft ausgeführt, um ein natürlicheres Klangerlebnis zu bieten.




Direktionalität mit Sprachfokus

Die Direktionalität mit Sprachfokus ist eine automatische Direktionalität, die den Öffnungswinkel in Abhängigkeit von der Stärke des Hintergrundlärms und der Richtung, aus der das Sprachsignal kommt, verändert.

Vorteil

Sprache wird hervorgehoben, was ein besseres Sprachverständnis, auch in geräuschintensiver Klangumgebung, ermöglicht.

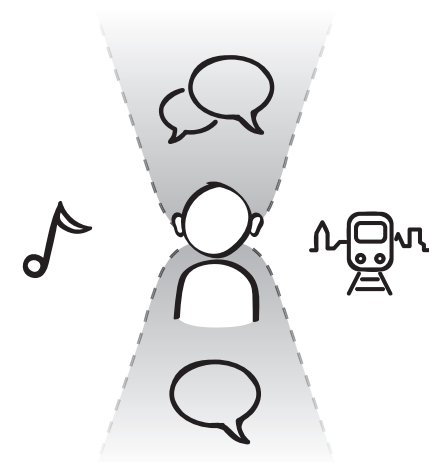


Adaptive Störgeräuschreduktion

Eine schnell agierende, spektrale Subtraktionstechnik, die Sprache und Geräusche präzise identifiziert und unerwünschte Geräusche ohne Beeinträchtigung des Sprachsignals reduziert.

Vorteil

Erhöht den Komfort ohne das Sprachverstehen zu beeinflussen.

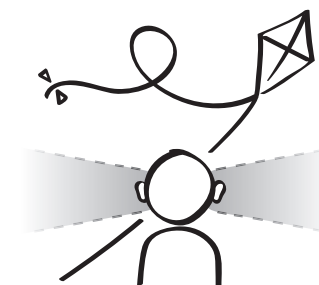


Adaptive Windgeräuschreduktion

Eine spezielle Geräuschunterdrückungstechnik, die zur Erfassung und Reduzierung von Windgeräuschen eingesetzt wird. Die Verstärkung von Sprachsignalen wird auch bei Wind beibehalten und das Feature reduziert keine Verstärkung, wenn kein Wind weht.

Vorteil

Mit der adaptiven Windgeräuschreduktion können die Hörsystemträger alles verstehen, was gesagt wird, auch bei Wind. Ob sie Rad fahren, wandern oder Golf spielen - sie können das Leben im Freien genießen, ohne Abstriche bei der Klangqualität oder beim Sprachverstehen zu machen.

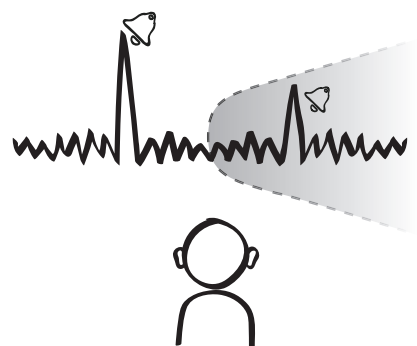


Impulsschallunterdrückung

Eine Funktion, die laute, plötzlich auftretende Geräusche in Echtzeit erkennt und verhindert, dass die lautesten Klangspitzen die Verstärkungsvorgabe des Hörsystems überschreiten.

Vorteil

Die Hörsystemträger hören das laute Geräusch auf einem angenehmeren und weniger scharfen Pegel und können selbst die lauteste Umgebung gut bewältigen.

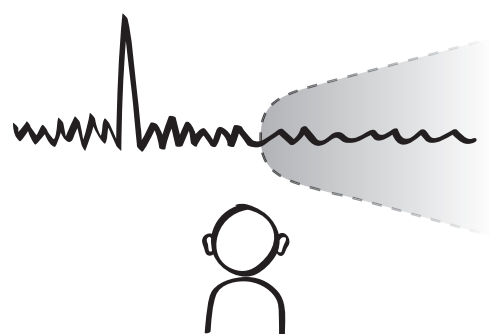


Rückkopplungs-Manager

Eine Rückkopplungsunterdrückung, die zwei Filter nutzt, um Rückkopplungen zu eliminieren, ohne die Verstärkung zu reduzieren oder Abstriche bei der Klangqualität zu machen. Der Rückkopplungs-Manager kann auch Rückkopplung durch plötzliche Bewegungen oder Gegenstände, die sich nahe am Ohr befinden, eliminieren.

Vorteil

Die Hörsystemträger können von einer erstklassigen Rückkopplungsunterdrückung profitieren und jederzeit ein Klangerlebnis ohne Rückkopplung oder Klangverzerrung genießen.

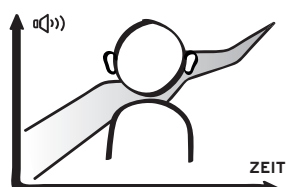

Eingewöhnungsmanager

Für einige Benutzer kann die Anpassung an die vorgegebene Verstärkung eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn sie zum ersten Mal Hörsysteme nutzen. Der Eingewöhnungsmanager erhöht die Verstärkung schrittweise bis auf die vorgegebenen Werte. Der Startpunkt kann bis auf 50 % der gewünschten Endverstärkung eingestellt und die Zeitdauer, über die die Verstärkung zunimmt, für jeden Benutzer individuell eingestellt werden.

Vorteil

Der Eingewöhnungsmanager ermöglicht es neuen Hörsystemträgern, sich bequem und nahtlos an die Verstärkung zu gewöhnen. Er kann auch nützlich sein, wenn es nach einer Neuversorgung über einen längeren Zeitraum nicht möglich ist, zur Kontrolle zu erscheinen.




Neue Technologie – bewährte Anpassung

Die neuen Funktionen der Interton Move Produktfamilie fügen sich intuitiv in die bewährte Anpass-Software ein.

Interton Move ermöglicht Ihnen neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden mit neuen Produkten zu begeistern. Die bewährte Anpass-Software „Interton Fitting“ ist einfach und intuitiv zu bedienen. Dies hilft Ihnen, sich vollkommen auf Ihre Kunden zu konzentrieren.

Die Interton Anpass-Software wurde verbessert, um Ihren Alltag effizienter zu gestalten und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Die Software wendet nun für den FirstFit personalisierte Werte für einige Features an, damit Sie Interton Move schnell und einfach anpassen können. Dadurch wird der Bedarf an Feinanpassungen nach der ersten Anpassung verringert.

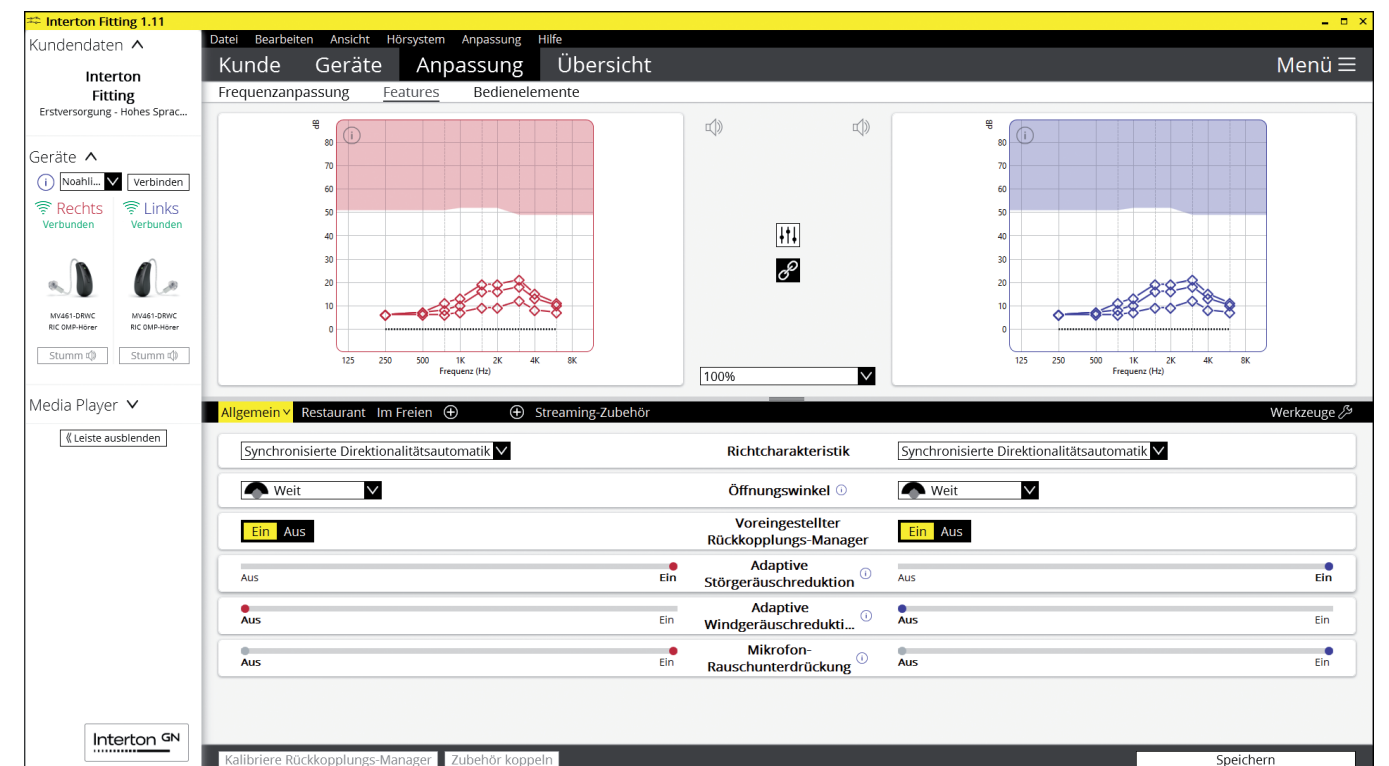

Interton Fitting Übersicht

6 Schritte

zur erfolgreichen Erstanpassung

FirstFit

- Der **FirstFit** leitet durch die folgenden Punkte
 - Hörsystem verbinden
 - Hörer auswählen
 - DFS Kalibrierung am Kundenohr
 - Physikalische Eigenschaften einstellen
 - In-situ-Audiometrie durchführen (optional)

Kunde Geräte Anpassung Übersicht

- Frequenzanpassung:** Verstärkung je Frequenz wählen
- Erweiterte Einstellungen:** Features einstellen
- Zubehör koppeln**


Kunde Geräte Anpassung Übersicht

- Anpassbericht / Information für den Kunden drucken**
- Speichern**
 - Datenbank + Hörsystem
 - Nur Hörsystem
 - Nur Datenbank




Auswahl der Verstärkungsdarstellung

- Insertion Gain
- 2 cm³ Kuppler
- Ohrsimulator

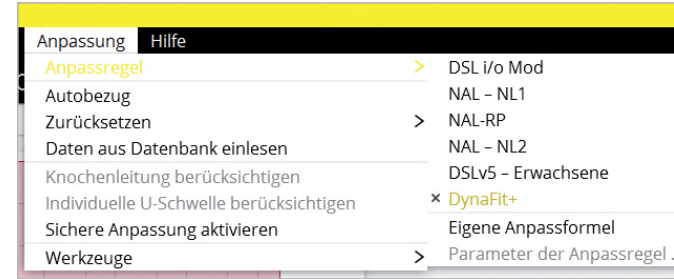


Auswahl verschiedener Anpassformeln inkl. der Möglichkeit, diese zu individualisieren

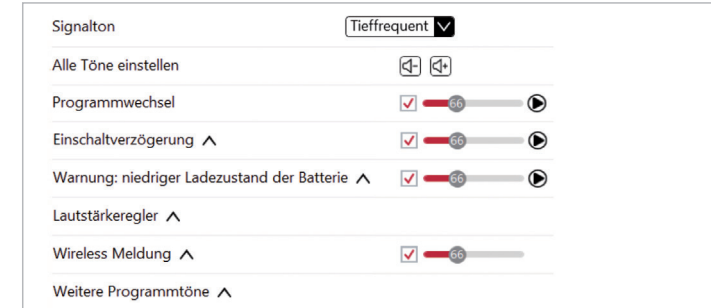


Anpassung diverser Gerätesteuierungen unter anderem

- Signalton
- Einschaltverzögerung
- Lautstärke der Signalton
- Programmierung der Wippe
- Regelbereich VC

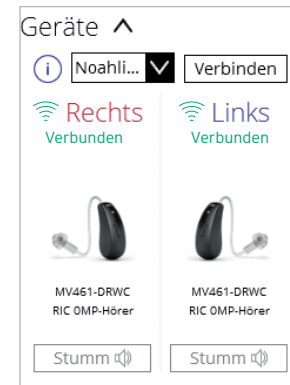

Status der Verbindung zum Hörsystem.

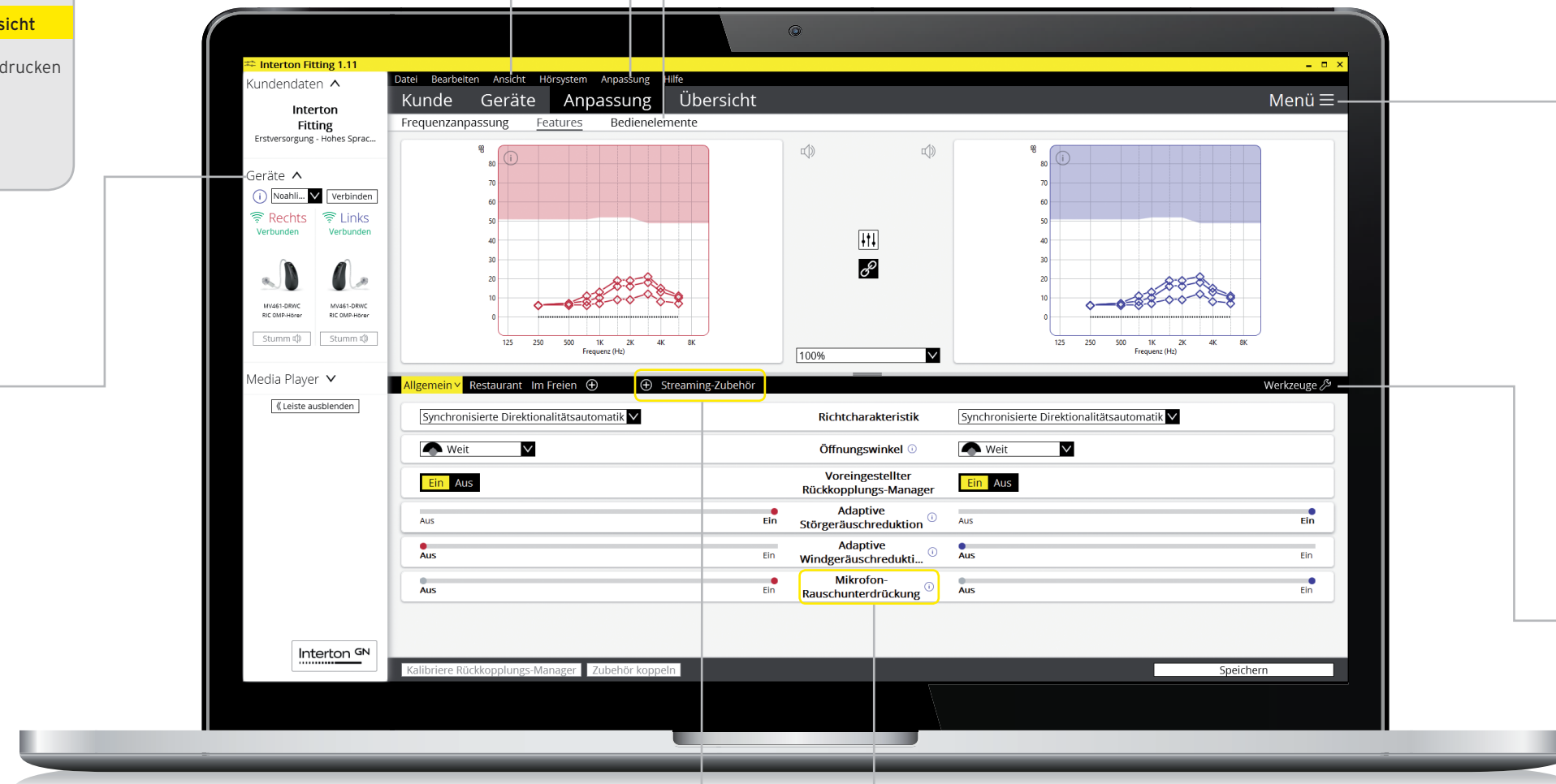

Menü X

Kunde

In-Situ Anpassung
Sprachergebnisse
RECD | REUG

Geräte

FirstFit
Zurücksetzen auf Erstanpassung
Rekonfigurieren
Testeinstellung HG
Zubehör aktualisieren

Anpassung

Tinnitus Sound Generator
Eingewöhnungs-Manager
Anpasshilfe

Im Menü finden Sie eine Vielzahl von weiteren Einstellungen, wie z.B. den Tinnitus-Sound-Generator.

Werkzeuge


Programme neu anordnen
Neu berechnen
Auto Bezug
Programmnamen verwalten
Programm kopieren
Programm einfügen

Individuell einstellbare Programme für 2,4 GHz-Funkzubehör

Streaming-Zubehör

Hinter dem Icon verbirgt sich ein erklärender Text zum Feature.

Durch klicken des Feature-Namens können Filme und Erklärungen abgerufen werden.

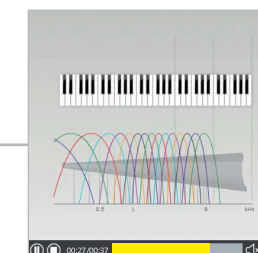

Programme neu anordnen

Die Reihenfolge der Programme ändern oder löschen. Neuberechnung aller Programme oder eines einzelnen Programms.

Auto Bezug

Feinanpassung von Programm 1 übertragen in die weiteren Programme oder Zubehör-Komponenten.

Programmnamen verwalten

Die Bezeichnung der einzelnen Programme ändern. Dies ändert auch die Bezeichnung im Zubehör.

Programm kopieren / einfügen

Die Einstellungen eines Programmes kopieren und in ein anderes Programm einfügen.

Die aktuelle Interton Fitting Version finden Sie unter: www.supportgn.com/interton

Ein Tag voller Freiheiten

Bei einem großartigen Hörsystem geht es nicht nur um den Klang – sondern auch darum, dass es sich nahtlos in das Leben einfügt. Interton Move ist so lange aktiv, wie seine Träger. Die Produktfamilie beinhaltet das erste wiederaufladbare Interton Hörsystem (RIC) mit eingebautem Lithium-Ionen-Akku, das bis zu 30 Stunden Leistung mit einer dreistündigen Aufladung liefert.

Die kleine und robuste Ladestation wird an die Steckdose angeschlossen. Sie nutzt induktives Laden **ohne** Metallkontakte, die im Laufe der Zeit korrodieren könnten.

Ihre Kunden nehmen ihre Hörsysteme einfach aus dem Ohr und setzen sie in die Ladestation. Die optischen LED-Anzeigen an den RIC-Hörsystemen blinken langsam, wenn die Hörsysteme in der Ladestation geladen werden, und leuchten dauerhaft grün, wenn die Hörsysteme vollständig aufgeladen sind.

LADEZEIT	AKKULAUFZEIT IN STUNDEN
3 Stunden =	30 24 bei 50% Streaming-Zeit
1 Stunde =	16
30 Minuten =	8



Ladestation mit wiederaufladbaren Interton Move Hörsystemen

Den Akkustand unterwegs prüfen

Für noch mehr Sicherheit können Kunden mit wiederaufladbaren Hörsystemen den Akkustatus jederzeit in der App überprüfen.



Frühstück
im Café

Abendessen
mit Freunden

Neue Möglichkeiten sich zu Verbinden

Ein weiterer wichtiger Faktor für ein großartiges Hörerlebnis ist die Erweiterung der Hörbarkeit über die Hörsysteme hinaus auf die anderen Geräte, die wir täglich für die Kommunikation, Arbeit und Unterhaltung nutzen.

Interton Move ist unser erstes Hörsystem, das dank der äußerst stabilen Bluetooth® Low Energy Technologie direkt sowohl von iOS- als auch von kompatiblen Android-Geräten streamen kann. Dies bedeutet, dass Sie Interton Move mehr Kunden mit der Gewissheit anbieten können, dass sie ihre Hörsysteme nutzen können, um Anrufe zu streamen oder ihre Lieblingsmusik oder den neuen Podcast zu hören.

Die Kunden profitieren weiter von den zahlreichen Vorteilen der Interton Sound App, darunter schnelle, diskrete Anpassungen der Lautstärke, die Funktion „Mein Hörsystem finden“ für verlegte Geräte sowie Tipps, damit die Träger immer das Beste aus ihren Hörsystemen herausholen können.

Ein weiterer neuer Vorteil der Interton Sound App ist die Möglichkeit, Interton Move Geräte aus der Ferne zu aktualisieren. Die Hörsysteme können aktualisierte Hörsystemsoftware direkt aus der App erhalten und installieren. Dies gewährleistet eine optimale Leistung, ohne dass Ihre Kunden in Ihr Geschäft kommen und die Hörsysteme mit der Anpass-Software verbinden müssen.

Ihre Kunden können ihr Interton Move Hörerlebnis erweitern und ihren Alltag mit unserem diskreten Funkzubehör verbessern. Sie können Klänge von ihrem Fernsehgerät in ihre Hörsysteme streamen oder Sprache von einer Person in geräuschvollen Umgebungen oder bei großen Zusammenkünften hören.



	 Direktes Audio-Streaming von iOS-Geräten	 Direktes Audio-Streaming von kompatiblen Android-Geräten	 Interton Sound App	 Funkzubehör
Interton Move 4	•	•	•	•
Interton Move 3	•	•	•	•
Interton Move 2			•	•

Unser Wireless-Zubehör

TV Streamer 2
Überträgt einen kristallklaren Klang vom Fernseher, der Stereoanlage oder dem Computer direkt in die Hörsysteme Ihrer Kunden. Und das ohne Zwischengeräte.

Multi Mic
Das Multi Mic wird an die Kleidung angebracht und kann aus bis zu 25 Metern Entfernung Sprache und Klänge direkt in die Hörsysteme Ihrer Kunden übertragen. Es funktioniert auch als Tischmikrofon und besitzt eine Vielzahl weiterer Einsatzmöglichkeiten (FM-Anbindung (DAI), Telefonspule, Klinkenbuchse).

Telefonclip 2
Überträgt Telefongespräche und Musik von einem Bluetooth-Telefon in die Hörgeräte Ihres Kunden. Für eine vollständige Kontrolle über Smartphones laden Sie unsere Interton Sound App herunter (funktioniert für Apple und Android).

Fernbedienung 2
Die Fernbedienung 2 bietet eine schnelle Übersicht über die Einstellung der Hörsysteme. Der Nutzer kann die Programme wechseln, die Lautstärke ändern oder die Übertragung vom TV Streamer und vom Multi Mic starten. Zudem informiert es den Träger über den Ladezustand der Hörsystembatterien.

Fernbedienung Mini
Programmwechsel und Lautstärkeänderung mit einem einfachen Knopfdruck durchführen. Die großen Tasten sind durch erhobene Symbole für haptisches Feedback gekennzeichnet.



Interton Sound App

Programmwahl, Lautstärkeregelung über das Smartphone in jeder Technikstufe

Mit der Interton Sound App passen Ihre Kunden die Move Hörsysteme ihren persönlichen Vorlieben an. Einstellungen für Lautstärke, Höhen und Tiefen der Hörsysteme sind jederzeit ganz einfach zu regulieren. Außerdem lassen sich Hörprogramme mit individuellen Einstellungen für verschiedene Hörsituationen abrufen. Ganz diskret verbessert die Interton Sound App den Hörkomfort.

Die Hörsysteme wiederfinden

Mit der „Finder“-Funktion lassen sich Hörsysteme einfach orten und wiederfinden.

Die Steuerung des Zubehörs


Zubehör, wie das Multi Mic lässt sich einfach und dezent steuern und einstellen.

Favorisierte Einstellungen speichern

Die Hörsystemeinstellungen können geregelt und in einer Favoritenliste gespeichert werden. Durch die Geotagging-Funktion des Telefons kann Interton Move die gespeicherten Höreinstellungen automatisch aktivieren, sobald der Nutzer an einen Ort in der Favoritenliste zurückkehrt. Natürlich können sie aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt aktiviert werden.

Hörsysteme updaten

Die Firmware der Interton Move Hörsysteme kann über die Sound App aktualisiert werden. Ihr Kunde erhält eine Mitteilung in der App, dass ein Firmware-Update zur Verfügung steht und kann dieses innerhalb weniger Minuten durchführen. So wird sichergestellt, dass Interton Move immer auf dem aktuellsten Stand sind und die optimale Leistung erzielen.

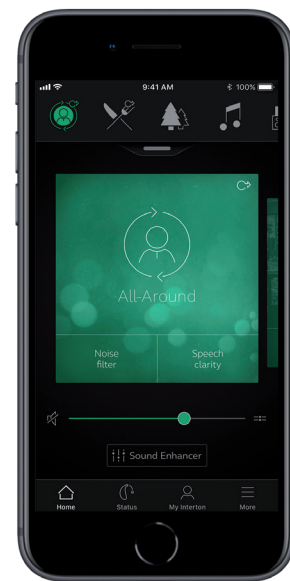

Informationen zur Kompatibilität zu mobilen Endgeräten finden Sie unter: [Interton.com/compatibility](https://www.interton.com/compatibility)



Direktes Streaming

Mit Interton Move können Ihre Kunden ganz einfach von iOS- und kompatiblen Android™-Smartphones streamen

Telefonieren

Lassen Sie Ihre Kunden klare, rückkopplungsfreie Gespräche und jederzeit verständliche Telefonate genießen.

Audio-Streaming in Stereo

Empfehlen Sie Ihren Kunden beste Stereoqualität für Podcasts, ihre Lieblingsmusik oder entspannten Filmgenuss.

Videoanrufe

Direktes Audio-Streaming funktioniert ebenfalls bei Videoanrufen. Ihre Kunden sehen Ihren Gesprächspartner auf dem Bildschirm und die Unterhaltung wird direkt in die Hörsysteme gestreamt.

Wegbeschreibungen

Auf unbekannten Straßen hören Ihre Kunden jederzeit deutliche Navigationsansagen und kommen sicher an ihr Ziel.

Direktes Android Streaming (ASHA) benötigt mindestens Android 10 und muss vom Smartphonehersteller aktiviert sein.

Entwickelt für ein Leben voller Freude

Das Leben intensiver zu führen bedeutet, sich auf die Dinge verlassen zu können, denen wir vertrauen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die gesamte Produktfamilie der Interton Move Hörsysteme vor Verschleiß und Abnutzung geschützt ist und angenehm am Ohr sitzt.

Alle Bauformen sind nanobeschichtet und IP68-zertifiziert. Das bedeutet, dass die

Hörsysteme höchsten Schutz vor Schweiß, Staub und Wasser bieten.

Interton Move nutzt die neuen SureFit 2C Hörer und SureFit 3 Domes, um verbesserte Kosmetik und Komfort zu bieten. Gleichzeitig ist die Anbringung des Domes komfortabler.



Geprüfte und bewährte Qualität von GN



Schweiß- und staubabweisende Nanobeschichtung



Modernes und ergonomisches Design für den täglichen Komfort



Farben

RIC- und HdO-Produkte

Grau	Mittelblond	Beige	Dunkelbraun	Schwarz
				

IdOs

Hell	Beige	Hellbraun	Braun	Dunkelbraun
				

Hörer und Domes

SureFit 2C Hörer für RIC-Produkte



LP-Hörer



MP-Hörer



HP-Hörer



mEx-Hörer (UP)
Auch verfügbar als LP, MP, HP

SureFit 3 RIC Domes



Offener Dome
Klein / Mittel / Groß



Geschlossener Dome
Klein / Mittel / Groß



Tulpen-Dome
Einheitsgröße



Power-Dome
Klein / Mittel / Groß

HdO Domes



Offener Dome
Klein / Mittel / Groß



Tulpen-Dome
Einheitsgröße





Power-Dome
Klein / Mittel / Groß

Ex-Hörer Systeme (RIC)

Bauform-Übersicht

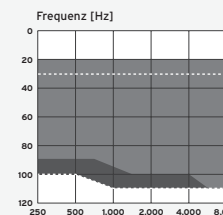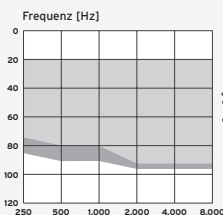

	Akku RIC 61	RIC 61	RIC 62
Anpassbereich			
Technikstufen	4	4 - 3 - 2	4 - 3 - 2
2,4 GHz Funktechnologie	●	●	●
Hörer Leistungsstufen	LP - MP - HP - UP	LP - MP - HP - UP	LP - MP - HP - UP
Max. Verstärkung¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	62 - 67 - 74 - 82	62 - 67 - 74 - 82	62 - 67 - 74 - 82
Max. Ausgangsschalldruck¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	123 - 125 - 129 - 136	123 - 125 - 129 - 136	123 - 125 - 129 - 136
Batteriegröße	Lithium-Ionen Akku	312	13
Programmwahltaste	●	●	Multifunktionstaste
Lautstärkesteller			
Doppelmikrofon	●	●	●
Telefonspule			●
Nanobeschichtet	●	●	●
IP-Klassifizierung	IP 68	IP 68	IP 68





1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator

FÜR RIC
■ Low-Power ■ High-Power
■ Medium-Power ■ Ultra-Power

IdO

Bauform-Übersicht

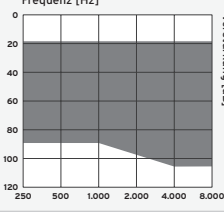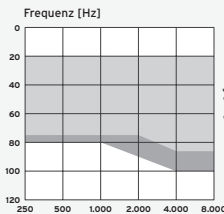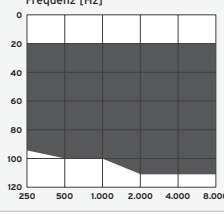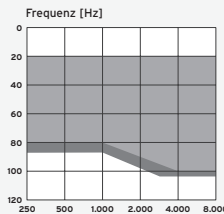

	CIC-W	ITC
Anpassbereich		
Technikstufen	4 - 3	4 - 3
2,4 GHz Funktechnologie	●	●
Hörer Leistungsstufen	LP - MP - HP	MP - HP - UP
Max. Verstärkung¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	49 - 59 - 69	59 - 69 - 78
Max. Ausgangsschalldruck¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	124 - 128 - 130	128 - 130 - 137
Batteriegröße	10A	312
Programmwahltaste	Optional	Optional
Lautstärkesteller		
Doppelmikrofon		●
Telefonspule		Optional
Nanobeschichtet	●	●

1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator

FÜR IDOs
■ Low-Power ■ High-Power
■ Medium-Power ■ Ultra-Power

HdO-Modelle

Bauform-Übersicht



	HdO 70 (offen)	HdO 70 (geschlossen)
Anpassbereich		
Technikstufen	4 - 3 - 2	
2,4 GHz Funktechnologie	●	●
Leistungsstufen/Konfiguration	Offen	Geschlossen (Kunststoffwinkel)
Max. Verstärkung¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	63	66
Max. Ausgangsschalldruck¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	131	134
Batteriegröße	13	13
Programmwahltaste	●	●
Lautstärkesteller	●	●
Doppelmikrofon	●	●
Telefonspule	●	●
Nanobeschichtet	●	●
IP-Klassifizierung	IP 68	IP 68

Super-Power-Modelle

Bauform-Übersicht



	Power HdO 80	Super Power HdO 90
Anpassbereich		
Technikstufen	4 - 3 - 2	4 - 3 - 2
2,4 GHz Funktechnologie	●	●
Leistungsstufen/Konfiguration	Metallwinkel	Kunststoffwinkel
Max. Verstärkung¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	80	86
Max. Ausgangsschalldruck¹ (50 dB SPL Eingang) (HFA)	141	144
Batteriegröße	13	675
Programmwahltaste	●	●
Lautstärkesteller	●	●
Doppelmikrofon	●	●
Telefonspule	●	●
Nanobeschichtet	●	●
IP-Klassifizierung	IP 68	IP 68

1: IEC60118-0 IEC 711 Ohrsimulator

Für HdO

Offen

Geschlossen

Funktionsübersicht

Funktionsbezeichnung		Interton Move 4	Interton Move 3	Interton Move 2
Klangqualität	Anzahl der Kanäle	12	8	6
	Umgebungsklassifizierung	•	•	•
	Eingangsdynamikbereich - 116 dB SPL	•	•	•
Hörkomfort	Adaptive Störgeräuschreduktion	•	•	•
	Adaptive Windgeräuschreduktion	•	•	•
	Mikrofonrauschunterdrückung	•	•	•
	Impulsschallunterdrückung	•		
Mikrofoneinstellungen	Kombinierte Direktionalität	•		
	Synchronisierte Direktionalitätsautomatik	•		
	Wählbarer Öffnungswinkel	•	•	
	Direktionalitätsautomatik	•	•	•
	Direktionalität mit Sprachfokus	•	•	•
	Feste Direktionalität	•	•	•
Rückkopplungsmanagement	Rückkopplungs-Manager	•	•	•
	Musikmodus	•		
	Voreingestellter Rückkopplungs-Manager	•	•	•
Eingewöhnung	Synchronisierter Eingewöhnungsmanager	•	•	
	Eingewöhnungsmanager	•	•	•
Komfort & Konnektivität	Ohr-zu-Ohr-Kommunikation (Programmwahl, Lautstärkereglung)	•	•	
	AutoPhone	•	•	•
	Comfort Phone	•	•	
	Direktes Audio-Streaming von iOS-Geräten	•	•	
	Direktes Audio-Streaming von kompatiblen Android-Geräten (ASHA vorausgesetzt)	•	•	
	Interton Sound App	•	•	•
	Fern-Firmwareupdate der Hörsysteme	•	•	•
Robustheit & Hardware	Nanobeschichtung (IP68 zertifiziert)	•	•	•
	Desktop Ladestation	•		
Funkzubehör	Fernbedienung 2 & Fernbedienung Mini	•	•	•
	TV Streamer 2	•	•	•
	Telefonclip 2	•	•	•
	Multi Mic	•	•	•
Anpassung	Einstellbare Hörprogramme	4	4	4
	Tieffrequente Anhebung (nur verfügbar mit UP-Hörer)	•	•	•
	Tinnitus Sound Generator (TSG)	•	•	•
	Datalogging	•	•	•
	Kabellose Anpassung mit Noahlink Wireless	•	•	•

Modell	WHO 4 Mini RIC 61	WHO 4 Standard RIC 62	Standard HdO 70	WHO 4 Super Power HdO 80	WHO 4 Super Power HdO 90	WHO 4 Akku RIC 61	Wireless CIC	Wireless ITC	Streaming mit iOS (Apple MFi)	Streaming ab Android 10 (A5-HA)	Interton Sound App
Batterie	312	13	13	13	675	Akku	10	312			
Move 4									 Direktes Streaming	 Direktes Streaming	
12 Kanäle											
Move 3											
8 Kanäle											
Move 2											
6 Kanäle											

Interton - Ein Teil von etwas Großem

Interton gehört zur GN Gruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, intelligente Audiolösungen anzubieten die das Leben besser klingen lässt - damit Ihre Kunden mehr hören können, als sie jemals für möglich gehalten haben.

Die GN Gruppe ist weltweit der einzige Anbieter audiologischer Medizintechnik, Bürolösungen und Unterhaltungselektronik unter einem Dach. Dies hat uns ein unerreichtes Wissen über das Hören und das menschliche Ohr verschafft.

Seit der Gründung vor über 150 Jahren war GN immer ein Vorreiter in der technischen Entwicklung. Wir verlegten das erste Unterseekabel, das Ost und West miteinander per Telegrafie verbunden hat (bekanntlich der Vorläufer des Internets). Und dieser Pioniergeist treibt uns noch heute an. So waren wir die ersten, die 2,4 GHz Wireless-Konnektivität, Made for Apple und viele weitere Innovationen eingeführt haben, von denen Menschen mit Hörverlust in aller Welt profitieren.

Als Teil der GN Gruppe profitiert Interton von über 150 Jahren Erfahrung und baut auf einer Tradition der Innovation bei Hörlösungen auf.

Helfen Sie Ihren Kunden mit Produkten und Lösungen von Interton dabei, besser zu hören - und wieder öfter zu lächeln.

GN Hearing GmbH | An der Kleimannbrücke 75 | 48157 Münster
Tel.: 0251 203 96-0 | www.interton.com

 facebook.com/IntertonDeutschland

© 2021 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. Interton ist eine Marke von GN Hearing A/S. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Dolby, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.