

Hengityksensuojaimen pukeminen

Pue suojain peilin edessä. Jos käytät silmälaseja, poista ne pukemisen ajaksi.

Pitkien hiusten tulee olla kiinnitettynä. Miehillä parta saattaa vaikuttaa suojaimen tiiviyyteen. Desinfioi kädet käsihuuhteella.



1 Siirrä kuminauhat suojaimen etupuolelle, avaa suojain auki ja muotoile nenäpehmuste taivuttamalla kevyesti keskikohdasta.



2 Aseta suojain kasvoille yhdellä kädellä.



3 Vedä alin kuminauha korvien alapuolelle ja ylin korvien yläpuolelle.



4 Vedä suojain leuan alta paikoilleen.



5 Paina suojainta kevyesti nenänvartta pitkin kahdella sormella molemmin puolin.

6 Tarkista suojaimen tiiviys hengittämällä voimakkaasti sisäänpäin. Jos käytät venttiilitöntä hengityksensuojainta, hengitä ulos nopeasti. Jos ilmaa tuntuu kasvojen iholla, silloin on ohivirtausta eikä suojain ole riittävän tiiviisti kasvoilla. Tarkista silloin suojaimen reunat ja säädä tarvittaessa kuminauhojen asentoa.



KATSO
OHJE
VIDEONA.

Jos käytät silmälaseja, pue ne. Laita lasien sangat kumilenkkien päälle. Desinfioi kädet käsihuuhteella.



Henkilökunnan on hyvä tarkistaa suojaimen tiiviys säännöllisesti hupputestauksella.